


NÁVOD NA OBSLUHU


Earlaser



DOVOZCA: Margaréta Kačníková
Valaská Dubová 110, 034 96, kancelária: Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Tel./fax:
02/55642101, mobil: 0905 500 150, www.vasogen.sk, e-mail: vasogen@vasogen.sk

- A = hlavový držiak
- B = ušná vložka
- C = regulačná skrutka
- D = držiak ušnej vložky
- E = laserový hrot
- F = laserová hlavica
- G = batérie
- H = telo lasera
- K = ON/OFF tlačidlo

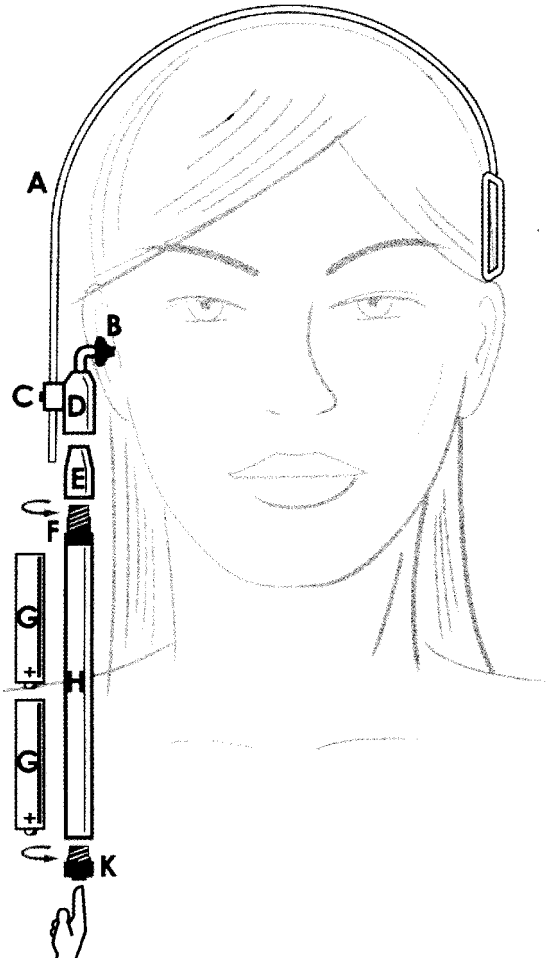

POZOR: Prečítajte si pozorne priloženú dokumentáciu. 
 Použitý materiál: kovové časti sú z antikorovej ocele + hliník, ušná časť z EPDM
 Zariadenie triedy: typ B

ÚDAJE

TinniTool Earlaser je vysokokvalitný, lekársky, laserový prístroj najnovšej technológie. POZOR! Tento laser používajte iba podľa uvedených pokynov na použitie.

OBSLUHA (pozri obrázok)

Inštalácia batérií: odskrutkujte tlačidlo ON/OFF (**K**) z tela lasera (**H**) a vložte obidve batérie (**G**) s (-) polom ako prvým.

Inštalácia držiaka ušnej vložky: odstráňte laserový hrot (**E**) z laserovej hlavice (**F**). Potom zaskrutkujte držiak ušnej vložky (**D**) do laserovej hlavice (**F**).

Nastavte polohu držiaka ušnej vložky (**D**) pomocou regulačnej skrutky (**C**) na hlavovom držiaku (**A**). Teraz môžete nastaviť hlavový držiak (**A**) opatrne tak, aby bol vhodne nastavený podľa potreby.

Aktivujte laser stlačením tlačidla ON/OFF (**K**). Červené svetlo vyžaruje do ucha. Následne si upravte v uchu ušnú vložku (**B**) tak, aby vám perfektne sadla. Po liečbe opäť stlačte tlačidlo ON/OFF (**K**).

LIEČENIE

Pri tinnituse 20 minút, raz denne počas 10 týždňov. Detailné inštrukcie sú priložené v príručke.

EFEKT

Iba pravidelným používaním je možné dosiahnuť požadovaného účinku. Vlastná liečba s **Earlaser** je úplne bezpečná, bezbolestná a aseptická. Sprievodným znakom toho prístroja je zahriatie, ktoré nie je škodlivé. Negatívna interakcia s inými terapiami nie je známa.

KONTRAINDIKÁCIE – INDIKÁCIE

Uchovávajte mimo dosahu detí. Laserový lúč nesmie byť zaoštrorený priamo do oka, eventuálne - nepozerajte sa priamo do lúča, a to ani cez optické pomôcky. Liečba sa neodporúča v nasledujúcich prípadoch: nepoužívať na hlave u detí; u pacientov s kardiostimulátormi v hrudníku alebo v blízkosti osoby s kardiostimulátorom; v brušnej oblasti alebo v nižšej oblasti hrudníka v prípade tehotenstva; u pacientov s nádorom, s podozrením na recidívu alebo metastázy; u detí s epifýzou aj pri podozrení ochorenia na kostiach; na štítnej žľaze, na vaječníkoch alebo semenníkoch alebo u pacientov postihnutých epilepsiou.

TERAPIA

Vlastné ošetrenie s **Earlaserom** nenahrádza medicínsky nevyhnutnú liečbu ani operácie.

V mnohých prípadoch ju však môžete s úspechom používať ako doplnkovú terapiu.

ČISTENIE

Vždy sa vyhnite použitiu agresívnych čistiacich prostriedkov. Vyčistite telo prístroja gázou alebo bavlnenou utierkou namočenou v alkohole. V prípade zranenia alebo bakteriálnej infekcie, by nemal laser prísť do styku s miestom liečby. Avšak, ak bol hrot lasera v kontakte s infikovaným miestom, môže byť vyskrutkovaný za účelom dezinfekcie. Odskrutkovateľné diely (nie telo lasera), môžu byť čistené s dezinfekčným prostriedkom vo vriacej vode alebo iným sterilizátorom max 135°C.

ÚDRŽBA + LIKVIDÁCIA

Prístroj nepotrebuje pravidelnú kontrolu alebo údržbu. **EarLaser** používa 2 x 1,5 V (LR03 AAA) batérie. Používajte len alkalické batérie. Batérie vyberte, ak laser dlhodobo nepoužívate. Nikdy sa nedotýkajte batérií a ošetrovaného súčasne pri prevádzke EarLaser. Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade s ochranou životného prostredia a zákonov príslušnej krajiny.

VYHLÁSENIE ZHODY

Týmto potvrdzujeme, že **TinniTool laser (EarLaser)** označený značkou CE, spĺňa požiadavky podľa EC smernice 93/42/EEC a hodnotenie kvality podľa EC smernice 93/42/EEC, príloha VII a V. Zdravotná pomôcka zodpovedá požiadavkám podľa EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60825-1. Skupinová norma: elektromagnetická tolerancia - požiadavky a skúšky.

Notifikovaný orgán: Intertek (0413)

Výrobca: DisMark GmbH – 8124 Maur – Švajčiarsko

CERTIFIKÁTY: CE (Európa) 93-42 EEC
CB (medzinárodný) IEC-EN 60601
ETL (USA/Kanada) UL 60601



SKLADOVANIE:

Teplota: -10°/+50°C

Vlhkosť: max. 99%

Atmosférický tlak: max 5 atm



LASEROVÉ ŽIARENIE

VYHNÚŤ SA
PRIAMEMU
ŽIARENIU DO OČÍ

TRIEDA LASERA: 3R

650 nm < 5 mW

IEC 60825-1 ED.1.2

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST	
Meno:	
Adresa:	
Model:	TinniTool EarLaser 5 mW
Dátum predaja:	
Podpis predajcu:	

ZÁRUKA

V prípade konštrukčnej chyby alebo chyby materiálu, garantujeme opravu alebo bezplatnú výmenu výrobku alebo poškodenej časti. Opravy môže vykonávať len výrobca. Prosím, vráťte chybný prístroj svojmu predajcovi s dokladom o kúpe a záručným listom. Záruka sa však nevzťahuje na batérie a škody spôsobené batériami. Záruka platí dva roky odo dňa uvedeného predajcom v záručnom liste. Oprava vykonaná na prístroji počas záručnej doby neznamená jej predĺženie. Záruka je neplatná, ak výrobok bol upravovaný neoprávnenými osobami alebo bol nesprávne použitý.